

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	
1.1	Deze handleiding.....	2
1.2	Gebruikte symbolen.....	2
1.3	Inhoud verpakking .....	2
1.4	De Bea .....	3
1.5	Aandachtspunten .....	4
<b>2</b>	<b>Beschrijving</b>	
2.1	Overzicht Bea .....	5
2.2	Technische gegevens .....	6
2.3	Zit plank.....	6
2.4	Voetenplank.....	6
2.5	Rugsteun .....	6
2.6	Wielen.....	6
<b>3</b>	<b>Gebruik</b>	
3.1	Ingebruikname .....	7
3.2	Aanwijzingen voor gebruik.....	7
<b>4</b>	<b>Onderhoud</b>	
4.1	Planning van onderhoud.....	8
4.2	Dagelijks onderhoud .....	8
4.3	Wekelijks onderhoud .....	8
4.4	½ Jaarlijks onderhoud .....	8
4.5	Jaarlijks inspectie en onderhoud.....	9
4.6	Verwijdering onderdelen .....	9
4.7	Onderdelenlijst.....	10
4.8	Optielijst.....	11
<b>5</b>	<b>Appendix</b>	
5.1	Garantiebepalingen.....	12
5.2	Over United Care Products .....	12
5.3	Contact.....	12
5.4	EG- Verklaring van overeenstemming .....	13

## 1.1 Deze handleiding

Het doel van deze handleiding is, om zorgverleners de Bea te kunnen laten bedienen en onderhouden.

De handleiding gaat in op de volgende aspecten:

- Beschrijving van de delen van de Bea
- Beschrijving van de werking
- Stap-voor-stap til instructies
- Onderhoud van de Bea, door de zorgverlener uit te voeren
  - procedures voor onderhoud
  - procedures voor reparaties
  - onderdelenlijst inclusief bestelnummers van alle onderdelen
- Quick Reference. Dit blad bevat een uiteenzetting van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften en aandachtspunten voor het bedienen van de Bea.

## 1.2 Gebruikte symbolen



Attentie punt



Leest eerst het handboek alvorens de opstahulp te bedienen



Let op Hoogspanning



De fabrikant van het product



De Bea opstahulp heeft een CE keurmerk

## 1.3 Inhoud van de verpakking

De inhoud van de verpakking:

- Bea opstahulp
- Rugsteun
- Zit plank
- Handboek
- Quick reference

Verwijder de verpakking van de Bea.

Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de paklijst.

#### 1.4 De Bea

De Bea is ontworpen om zorgvragers te verplaatsen die nog de mogelijkheid hebben zelfstandig te kunnen gaan staan, maar moeilijk / niet meer kunnen lopen. Het gebruik van de Bea is eenvoudig, maar vereist wel enige instructie. Met behulp van deze opstahulp is de zorgverlener in staat de zorgvrager te verplaatsen op veilige en efficiënte wijze. Dit handboek geeft een overzicht van de mogelijkheden van de Bea opsta- en transferhulpmiddel. De Bea is niet geschikt voor zorgvragers met een te laag bewustzijn. Wanneer u twijfelt met betrekking tot het gebruik, schroomt dan niet om United Care Products te bellen. De Bea is geheel van roestvrij materiaal en dus geschikt om in natte ruimtes te gebruiken.

De Bea kan worden gebruikt bij de volgende soorten verplaatsingen

- Van een normale stoel/rolstoel naar het toilet en v.v.
- Van een normale stoel/rolstoel naar een bed en v.v.
- Van een normale stoel/rolstoel naar een douche/bad-toiletstoel en v.v.
- Als opstahulp zonder voetplaat, om zeer voorzichtig een paar passen te lopen (optioneel)

De Bea kan als optie ook worden uitgerust met bijvoorbeeld een toilet zitting, toilet emmer, kniesteun, hogere wielen, opklapbare voetenplank, voeten aanslag, dubbele glijstangen e.a.

De te verwachten levensduur van de Bea, bij normaal gebruik, is 10 jaar (100.000 transfers) bij onderhoud volgens voorschrift.




### 1.5 Aandachtspunten

- De Bea is ontworpen om de zorgvrager te laten staan/zitten en te verplaatsen en mag als zodanig ook alleen voor dit doel worden gebruikt. Elk ander gebruiksdoel is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan de Bea te belasten met meer dan 160 kg, tenzij op de Bea anders is aangegeven.
- Behandel de Bea met zorg. Zorg voor een schone en nette werkomgeving.
- Het werken met de opstahulp is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- De Bea moet minimaal één keer per jaar worden gekeurd, door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- Service en onderhoud aan de opstahulp is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- Het vervangen van constructieve delen van de opstahulp is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
- Indien er vervormingen of beschadigingen zijn opgetreden aan de opstahulp door foutief gebruik of door transport dan mag deze niet meer worden gebruikt en dient retour te worden gezonden aan de leverancier.
- De opstahulp mag niet worden gebruikt op hellende vlakken met een hellingshoek van meer dan 5 graden.
- Controleer bij het aanrijden en het verrijden van de Bea altijd of de ruimte, waar de transfer plaatsvindt, vrij is van obstakels. Kijk hiervoor ook onder bed of (rol)stoel. De Bea mag nooit met de poten vastlopen of blijven haken.

### 2.1 Overzicht Bea

De volgende onderdelen worden in een eigen sectie nader beschreven.

- 1 Zit plank
- 2 Voetenplank
- 3 Rugsteun
- 4 Achterwiel geremd
- 5 Voorwiel

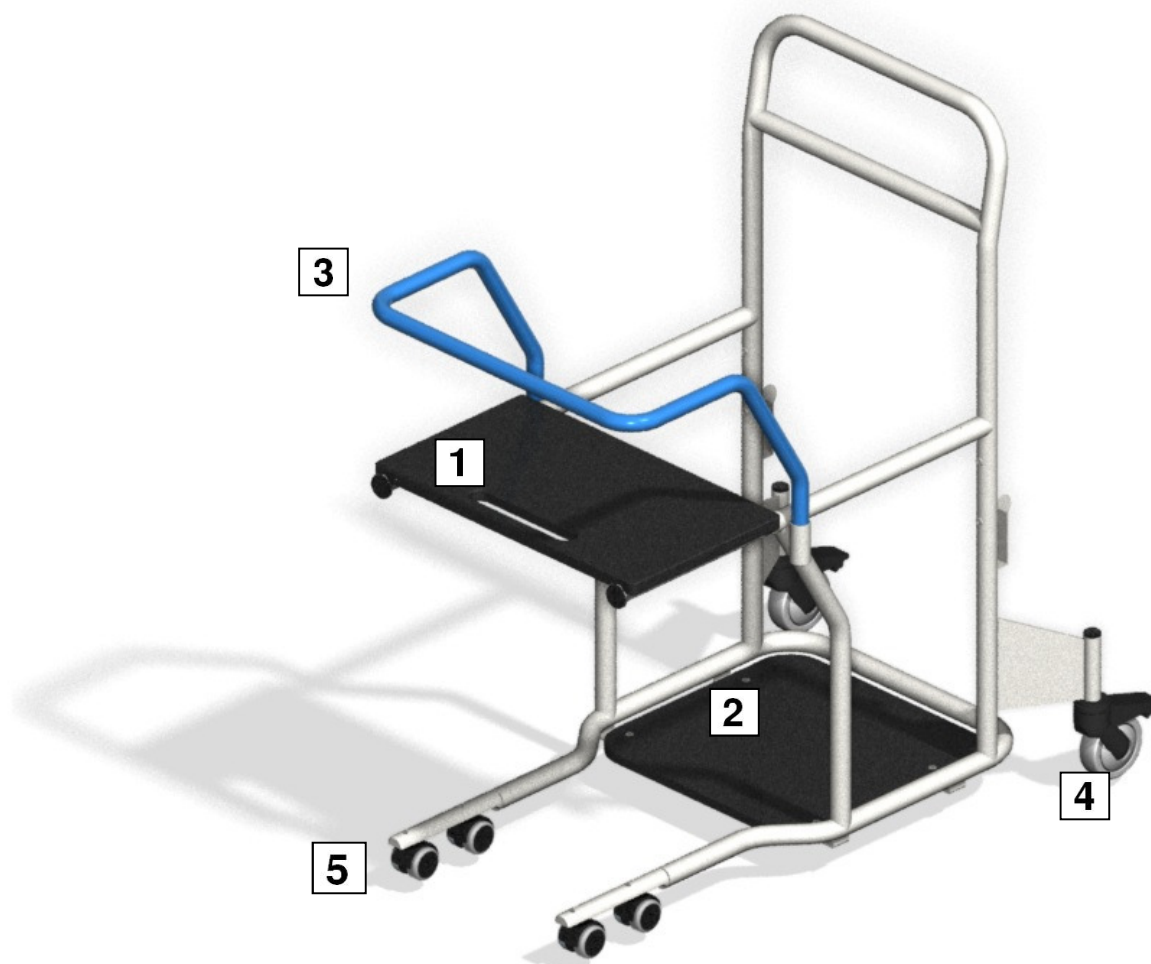

## 2.2 Technische gegevens

Maximaal toelaatbaar gewicht:

Bea 130	130kg
Bea maxi	140 kg
Bea 160	160 kg

	Bea 130/160	Bea maxi
Totale hoogte	107 cm	107 cm
Totale breedte	67 cm	77cm
Draaicirkel van	115 cm	120 cm
Gewicht Bea	22kg	25kg

Zie ook de figuur hiernaast

## 2.3 Zit plank

De Bea is uitgerust met een slagvaste kunststof zitting die zowel op de uittrekbare stangen als tussen de beugels kan worden gelegd. Trek de glijstangen helemaal tot het einde uit. Leg daarna de plank met de uitsparing op het frame van de Bea.

## 2.4 Voetenplank

De voetenplank is voorzien van een antislip laag.

## 2.5 Rugsteun

De Bea heeft een afneembare rugsteun. Deze is voor de veiligheid en is niet zo zeer bedoeld als rugsteun. Hiervoor is deze niet comfortabel genoeg.





Absoluut niet aan de rugsteun beugel optrekken!

## 2.6 Wielen

De Bea heeft zes zwenkwielen: vier kleine ongeremde wielen aan de uiteinden van de poten twee grote geremde wielen aan de achterzijde.

Het vanuit stilstand verrijden van de opstahulp kost het minste kracht als de wielen van het onderstel al in het verlengde van de rijrichting staan.

Om te zorgen dat de Bea op een bepaalde plaats blijft staan kunnen de grote achterwielen op de rem worden gezet.

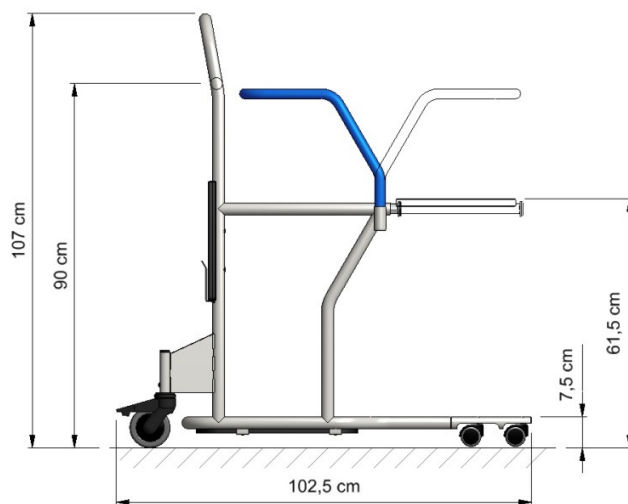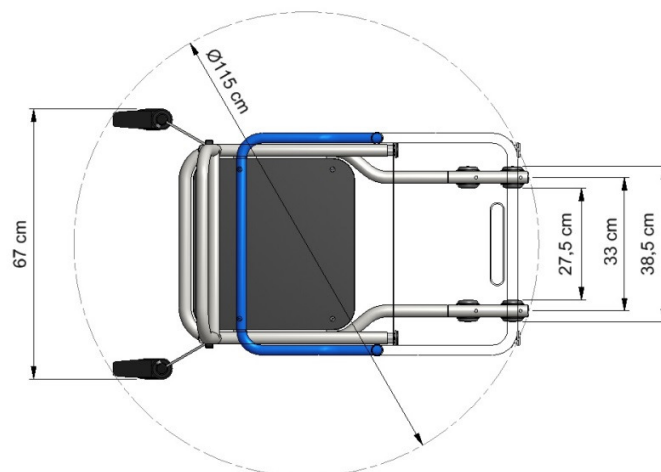

### 3.1 Ingebruikname

Controleer de Bea voor gebruik op de volgende punten:

- Is de rugsteun aanwezig
- Is de zitting aanwezig
- Zijn de uitschuif stangen uit te schuiven, en lopen ze in de uiterste stand tegen een aanslag aan.
- Kunnen de wielen vrij bewegen.

Stel jezelf eerst op de hoogte of de zorgvrager voldoende sta functie en bewustzijn heeft om de Bea te gaan gebruiken.

De Bea is klaar voor gebruik.

Zorg altijd voor een nette en schone werkomgeving.

### 3.2 Aanwijzingen voor gebruik

#### Stap 1

Stelt u zich vooraf altijd op de hoogte of een zorgvrager met de opstahulp mag en wil worden geholpen! Rijd de Bea aan bij de zorgvrager in (rol)stoel, op bed of toilet. Verwijder de rugsteun van de Bea.

#### Stap 2

Vraag zorgvrager de voeten op de voetsteun te plaatsen of help erbij mee. Zet de Bea op de rem.

#### Stap 3

Vraag de zorgvrager zich aan de bovenste of onderste stang tot stand op te trekken.



NB Absoluut niet aan de rugsteun beugel optrekken die bestemd is als rugsteun!

#### Stap 4

Schuif de zijstangen van de Bea uit en plaats de zitting erop met de uitsparingen naar beneden op de stangen.

#### Stap 5

Vraag de zorgvrager te gaan zitten, plaats zo nodig de rugsteun.

#### Stap 6

Vrijd de zorgvrager naar (rol)stoel, toilet of bed.

#### Stap 7

Verwijder zo nodig de rugsteun.

#### Stap 8

Vraag de zorgvrager te gaan staan (zie stap 3 en 4). Verwijder de zitting en schuif de stangen in.

#### Stap 9

Rijd de zorgvrager zo dicht mogelijk bij (rol)stoel, toilet of bed. (Kuiten tegen de zitting aan)

#### Stap 10

Zet de Bea op de rem.

#### Stap 11

Vraag de zorgvrager te gaan zitten.

#### Stap 12

Haal de Bea van de rem en rijd haar weg.

#### 4.1 Planning van onderhoud

De Bea is zo geconstrueerd dat onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven. Aangeraden wordt om de volgende onderhoudsplanning aan te houden:

Dagelijks en Wekelijks onderhoud kan door de gebruikers van de Bea gedaan worden.

Het ½ Jaarlijks onderhoud door de technische dienst.

De Jaarlijkse inspectie en eventuele reparatie ervan door United Care Products middels de zogenaamde Periodieke inspectie Overeenkomst (PIO).



Neem bij twijfel over de conditie van de Bea altijd contact op met de TD of United Care Products.

#### 4.2 Dagelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers van de Bea op dagelijks basis worden uitgevoerd. Controleer of alle delen van de Bea aanwezig zijn zoals zit plank, rugsteun, e.d.

#### 4.3 Wekelijks onderhoud

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers van de Bea op wekelijkse basis worden uitgevoerd. Het is aan te raden de Bea wekelijks schoon te maken. Het kan het best schoon gemaakt worden met huishoud schoonmaakmiddel en een goed uitgeknepen vochtige doek.

Controleer of alle beweegbare delen gemakkelijk bewegen, zonder hinderlijke bijgeluiden.

Controleer de leesbaarheid van het serienummer sticker, de aanwezigheid van een handboek, quick reference kaart en logboek.

#### 4.4 ½ Jaarlijks onderhoud

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst elke half jaar aan de Bea kan uitvoeren.

Controleer de bevestiging van de voetenplank.

Schade aan kunststof delen controleren.

Wielen controleren of ze gemakkelijk draaien en of de rem goed werkt.

Controleer of alle wielen de grond raken.

Alle bouten dienen goed aangedraaid te zijn en dus niet los zitten.

Controleer de Bea op vervormingen.

Controleer ook eventuele scheuren in de lak, dit kan het gevolg zijn van eventuele vervormingen.

Reinig wanneer nodig de delen grondig.



Wanneer de Bea niet voldoet aan één of meer van de bovengenoemde punten dient deze buiten werking te worden gesteld en moet contact worden opgenomen met United Care Products.



#### 4.5 Jaarlijks inspectie en onderhoud

Wij adviseren om de Bea één keer per jaar te keuren. Dit kan worden gedaan door United Care Products of door een ander daartoe bevoegde instantie. United Care Products biedt u de mogelijkheid om uw opstahulp eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren, middels de Periodieke Inspectie Overeenkomst. De eerst volgende inspectiedatum staat op de service controlesticker (zie het rechter figuur hiernaast).

Deze vindt u op de opstahulp, nabij het serienummer sticker. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met United Care Products opnemen.

De service controle sticker (rechts) geeft aan wanneer de volgende Periodieke Inspectie aan de Bea moet worden uitgevoerd.




#### 4.6 Verwijdering onderdelen

Alle onderdelen die vervangen of verwijderd worden en dus weggegooid worden, kunnen terug worden gestuurd naar United Care Products. Ook is het mogelijk deze onderdelen aan de monteur aan te bieden voor vernietiging. Wij zullen ervoor zorgen dat alle onderdelen op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.



4.7 Onderdelenlijst

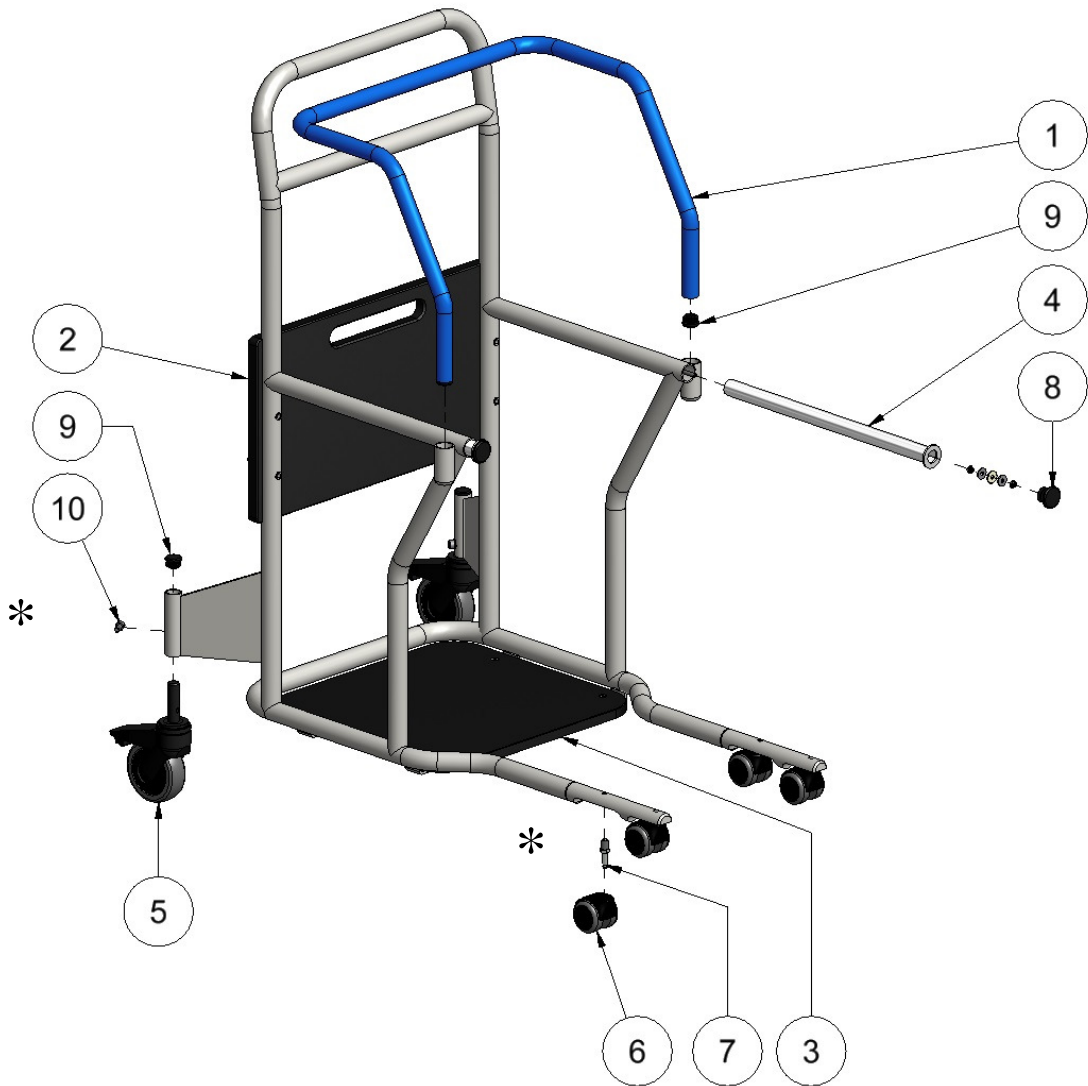

1	Rugsteun Bea	13100080
	Rugsteun Bea maxi	13100250
2	Zitting Bea	13100070
	Zitting Bea maxi	13100330
3	Voetenplank Bea	13100440
	Voetenplank Bea maxi	13100470
4	Glijstang 130/140kg	13300010
	Glijstang 160kg	13300011

5	Achterwiel geremd	13100100
6	Voorwiel	13100260
7	Voorwiel pen	13100270
8	Afdekdop d=35	13100200
9	Lamellenstop d=25	13100180
10	Lage inbusbout M8x16 rvs	19101010
*	Schroefdraadborgmiddel	11101110

4.8 Optielijst

**13000120**  
Bea standaard

**13000140**  
Bea maxi  
Bea 10cm breder



**13000060**  
Bea met dubbel e  
glijstang

**13000170**  
Bea 160kg met  
dubbele glijstang

Aanpassing op Bea

Onderste glijstang  
gelijke hoogte als  
standaard Bea.

Bovenste glijstang  
tussen de 3-12cm  
hoger.

**13000160**  
Bea met  
verstelbare  
voetenplank

Aanpassing op Bea

Voeten plank met  
de hand 17 cm te  
verstellen.



**13000070**  
Bea maxi met  
omgekeerde poten

**13000110**  
Bea maxi 160kg met  
omgekeerde poten

Aanpassing op Bea

Bea maxi 64,5cm  
tussen de voorwielen

Bea 54,5cm tussen de  
voorwielen



**13100360**  
Bea toiletzitting

Bea standaard



**19100280**  
Ondersteek RVS

Met RVS deksel

Ondersteek geleiderail  
**19100130**

RVS



**19101510**  
Toilet emmer RVS

Met RVS deksel

Emmer geleiderail  
**19100120**

RVS

### 5.1 Garantiebepalingen

United Care Products geeft 1 jaar garantie op de Bea. United Care Products geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage of onzorgvuldig gebruik (zoals wielen).

Verder is de garantie niet van toepassing op schade of gebreken welke aan de Bea kunnen ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij United Care Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger.

United Care Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het product aan te brengen in afwijking van hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

### 5.2 Over United Care Products

Het uitvoeren van verplaatsingen in de gezondheidszorg vraagt van veel partijen grote inspanningen en met name van zorgverleners een grote deskundigheid.

United Care Products is een bedrijf dat zich met diensten en producten richt op mensen die dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van transfers. Daarbij is de mobiliteit van de zorgvrager het uitgangspunt: samen met zorgverleners en zorgvragers wordt gewerkt aan oplossingen die de mobiliteit van de zorgvrager behouden en/of verbeteren. Door aan te sluiten bij, en gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van de zorgvrager wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van zorg voor de zorgvrager en een verbetering van de kwaliteit van arbeid voor de zorgverlener.

United Care Products levert daarvoor de volgende producten/diensten:

- Til liften
- Opstalliften
- Bed liften
- Plafondliften
- Hoog-laag baden
- Po- en douchestoelen
- Douchebrancards
- Overige transfermiddelen
- Accessoires bij transfermiddelen
- Training en advies

*De visie, diensten en producten van United Care Products maken haar een uitstekende partner in de samenwerking met zorgverleners en zorgvragers.*

### 5.3 Contact

United Care Products BV  
Industrieweg 27  
9672 AP Winschoten  
Postbus 53  
9670 AB Winschoten  
Telefoon (0597) 45 83 26  
Fax (0597) 45 83 24  
www.unitedcare.nl  
info@unitedcareproducts.nl



#### 5.4 EG- Verklaring van overeenstemming

Wij: United Care Products BV  
Industrieweg 27  
9672 AP Winschoten  
Nederland

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat:

##### “BEA II” opstahulp

waarop deze verklaring betrekking heeft en welke valt onder klasse I van de Europese richtlijn medische hulpmiddelen, in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende richtlijn:

##### Richtlijn 93/42/EEG

en in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten:

**ISO/DIS 14971**  
**EN 10535**  
**pr EN 980**  
**NEN 12182**

Namens United Care Products BV,

Plaats en datum : Winschoten, 20 december 2011

Naam en functie : Jan Stevenson, directeur

Handtekening

