


## BEDIENINGSVOORSCHRIFT AT-OS BEDPANSPOELER AF2 C

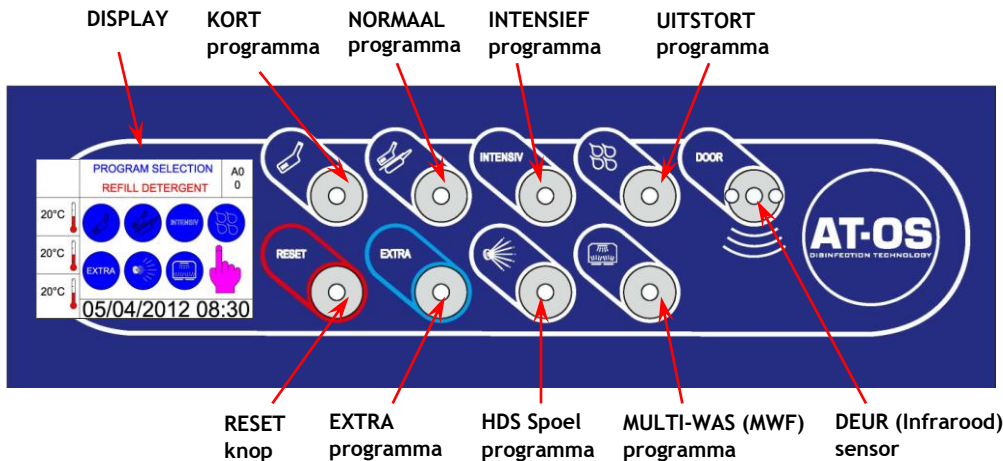

Startknop voor “KORT” programma .

Alleen geschikt voor het reinigen van urineflessen met vervuilde inhoud.



Startknop voor “NORMAAL” programma.

Geschikt voor het reinigen van bedpannen, urineflessen en overige verpleegmiddelen met vervuilde inhoud.



Startknop voor het “INTENSIEF” programma.

Geschikt voor het reinigen van bedpannen, urineflessen en overige verpleegmiddelen met een zwaar vervuilde inhoud.



Startknop voor het spoelen van de uitstortunit.



EXTRA Programma (op special verzoek geïnstalleerd) of geïnstalleerd als UPS (Ultra Prewash System) programma.



HDS (High Desinfectie Systeem): Speciaal programma voor verwijdering van de Clostridium Difficile bacterie. Deze knop activeren voordat u het juiste programma selecteert en kiest (KORT, NORMAAL of INTENSIEF).



MULTI-WAS (MWF) programma is een special reiniging- en desinfectieprogramma. Dit kan alleen gebruikt worden als de speciale multi-was korf AF66 in de machine is geplaatst.

Als een knop niet oplicht is dit programma niet geactiveerd. De melding “Programma niet ingeschakeld” verschijnt in het display.

Een programmaknop min. 1 sec. ingedrukt houden om het programma te activeren, het symbool kleurt groen.

### WAT TE DOEN ALS ONDERSTAAND ALARM IN HET DISPLAY VERSCHIJNT:

E17: Leegmelding naglansmiddel - vervang de lege tank naglansmiddel in de onderbouw.

E18: Leegmelding zeepmiddel -vervang de lege tank zeepmiddel in de onderbouw.

Verwijder de aanzuiglans en plaats deze in een volle can.